

染色體送檢須知

檢體類別	羊水	血液	臍帶血	絨毛、流產組織
使用容器	 無菌針筒 使用通過毒性測試之針筒 (建議品牌：NIPRO、BD、TOP)	 Sodium Heparin 採血管(綠頭管)		 無菌螺旋罐 70 ml / 50 ml
送檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 建議採檢17-18週之羊水。 用無菌針筒抽出，並貼上個案姓名及病歷號碼。 檢體不可冷凍。 將檢體存放於保麗龍送檢盒內運送。 § 若使用非建議的針筒，可能有syringe toxicity風險，導致細胞無法生長。 	<ol style="list-style-type: none"> 直接使用含有Sodium Heparin的空針或用Sodium Heparin之綠頭管裝載，貼上個案姓名及病歷號碼。 檢體不可冷凍。 將檢體置於密封袋內運送。 	<ol style="list-style-type: none"> 置於內含培養液的無菌容器裝載，蓋子旋緊並貼上個案姓名及病歷號碼，胎盤必須含有villus。 檢體不可冷凍。 瓶口處以parafilm 或透氣3M 膠帶密封後，置於密封袋內。 	
保存條件	冷藏(2~8°C)冰箱保存 (運送過程請勿在室溫下超過2小時)	冷藏(2~8°C)冰箱保存 (運送過程請勿在室溫下超過2小時)		冷藏(2~8°C)冰箱保存 (運送過程請勿在室溫下超過2小時)
適當檢體量	20ml以上	5ml以上	2ml以上	10 mg (約1公分立方或一指節大小)以上
檢體不符合判定標準	<ol style="list-style-type: none"> 檢體資料與紀錄聯標示不合。 冷凍之檢體。 檢體量少於10ml。 	<ol style="list-style-type: none"> 檢體資料與檢驗單標示不合。 冷凍之檢體。 非Sodium Heparin管抽取。 		<ol style="list-style-type: none"> 檢體資料與檢驗單標示不合。 冷凍之檢體。 容器未裝溶液，細胞乾死。
【不良檢體】 原則上接受培養， 但於實驗室註記， 並告知送檢窗口。	<ol style="list-style-type: none"> 檢體送達時間超過5天。 16週以下或24週以上。 檢體量少於15ml 血紅色、棕褐色或含血塊。 	<ol style="list-style-type: none"> 檢體送達時間超過3天。 有凝血或溶血。 周邊血少於4ml；臍帶血少於1.5ml。 		<ol style="list-style-type: none"> 組織檢體不足10mg。 檢體送達時間超過3天。